


prolife orto

Бандаж
согревающий



Бандаж
послеоперационный

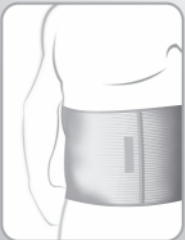

Корсет
поясничный




Корсет
поясничный



Дородовый
бандаж



Бандаж
поддерживающий для руки

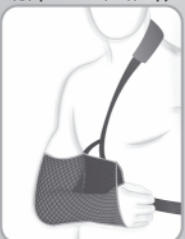

Корректор
осанки



Корректор осанки
детский



Корсет
грудо-поясничный



prolife orto

Бандаж
на коленный сустав



Бандаж
на коленный сустав



Бандаж
на коленный сустав



Бандаж
на коленный сустав



Бандаж
на голеностопный сустав



Бандаж
на голеностопный сустав



prolife orto

Бандаж на голеностопный сустав

ARA9400

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Данный бандаж изготовлен из высококачественного материала, что делает использование изделия максимально безопасным и комфортным. Высокое качество изделия подтверждено международными и европейскими сертификатами на соответствие стандартам качества ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, EN 14971:2004, MDD 93/42/EEC.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Профилактика растяжения связок голеностопного сустава.
- Профилактика травм голеностопного сустава при занятиях спортом и интенсивных физических нагрузках.
- Реабилитация после травм и операций на голеностопном суставе.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- Анатомический дизайн изделия обеспечивает лучшее прилегание к телу, что создает высокий комфорт при ношении.
- Специальное плетение по краям бандажа позволяет избежать скручивание краев и предупреждает сдавливание мягких тканей.
- Материал бандажа изготовлен по уникальной технологии трехмерной вязки из воздухо- и влагопроницаемого материала, оптимально облегает сустав и создающего компрессионный эффект.

www.prolife-orto.com

Prolife® is the registered trademark by Montex Swiss AG,
Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck, Switzerland

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом. Необходимый размер биндажа подбирается по обхвату голеностопного сустава по косточке, согласно таблице. Индивидуальный режим и сроки ношения биндажа определяет врач.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед началом использования изделия проконсультируйтесь с врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции изделия. Не допускается эксплуатация поврежденного изделия.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

Местные заболевания кожи являются противопоказанием для применения изделия. При гиперчувствительности к компонентам материала изделие необходимо надевать на нижнее белье. Не надевать изделие при использовании согревающих мазей в области голеностопного сустава.

Подбирать размер необходимо непосредственно по обхвату голеностопного сустава по косточке согласно таблице:

Область измерения	Размеры				
	S	M	L	XL	XXL
Обхват голеностопного сустава по косточке, см	24 – 26	26 – 28	28 – 31	31 – 34	34 – 37



При измерении обхвата голеностопного сустава сантиметровая лента должна плотно прилегать к телу, не нужно слишком ее натягивать или ослаблять.

СХЕМА НАДЕВАНИЯ



УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Использовать ручную стирку мягкими моющими средствами при температуре не выше +30°C. Во время стирки не тереть и не выкручивать. При сушке избегать контакта с прямыми источниками тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке. Не подвергать воздействию высоких температур (выше +120°C).

Состав: полиамид 55%, эластан 45%.

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +5°C до +40°C, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Срок хранения: 5 лет от даты изготовления. После окончания срока хранения производитель не гарантирует сохранение достаточной эластичности изделия.

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты покупки.

Дата производства: см. на упаковке.

Размер: см. на упаковке.



ISO 9001
ISO 13485



Производитель: Хегели Ортопедик Урунлер Сан. Ве Тик. Лтд. Сти. Джихангир Мах. Сехит ПиядеР Явуз Бахар Сок. Но4 Мираббо СанаиСитези Д; Блок Кат: 3 Амбарли, Авджилар, Стамбул, Турция.